

INSTRUCTIES VOOR HET VERZAMELEN EN VERZENDKLAAR MAKEN VAN DE TESTKIT: DTS



Lees eerst de instructies helemaal door voordat u aan de afname van de monsters begint! Bij vragen: neem eerst contact op met uw behandelaar!

De testkit bestaat uit:

- Handleiding voor monsterafname
- 2 x Fecesbuis (bruine dop)
- 1x TFT-kit (3x Fecesbuis groot)
DAG 1 en DAG 3 bevatten
(SAF) vloeistof, voor fixatie van parasieten





Let op: De fixatievloeistof (SAF) heeft een geringe toxiciteit. Huidcontact is, indien dit direct met water wordt afgespoeld niet schadelijk. De waarschuwing dient met name om te voorkomen dat kinderen de vloeistof drinken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Giet de fixatievloeistof niet uit de buis.

- 1 x Histaminebuis
(groen/blauwe dop
met stabilisator)



Let op: De stabilisator is een bijtende vloeistof, deze niet in contact brengen met de huid. Buiten bereik van kinderen bewaren. Giet de stabilisator niet uit de buis.

- Etiket voor histaminebuis
- 3 x Ontlastingsopvanger
- 2 x RigidSafetyBag®
- Safetybag

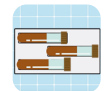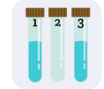

Daarnaast heeft u een retourenvelop en aanvraagformulier van RP Analytic ontvangen. Is uw pakket niet compleet? Neem dan telefonisch contact op via +31(0)113-370170 (ma.-vr. 8:30-12:30 en 13:30-17:00).

Vorbereiding:

1. Vul uw naam en geboortedatum in op het etiket op de fecesbuizen.
2. Vul uw naam en geboortedatum in op het etiket op de histaminebuis en plak deze op de histaminebuis.

3. Controleer of uw gegevens correct zijn ingevuld op het aanvraagformulier.
4. Controleer of er vloeistof in de histaminebuis en buizen 1 en 3 van de TFT-kit zit. Is dit niet het geval? Neem dan eerst contact met ons op via het eerder genoemde nummer.
5. Vul de afnamedatum in op het aanvraagformulier en ga akkoord met de voorwaarden.
6. Bekijk de volgende 3 instructiefilms via de volgende YouTube links:



TFT
Histamine
Feces

Of via de website: www.rpsanitashumanus.com/diensten/rp-analytic/testkits

Belangrijk!

- De TFT-test moet op **drie opeenvolgende dagen** worden afgenomen. Darmparasieten worden onregelmatig uitgescheiden, daarom is het belangrijk om op drie verschillende dagen ontlasting af te nemen.
- Indien u meerdere malen per dag ontlasting produceert, dient u toch slechts **éénmaal per dag een container** te vullen. Indien u geen dagelijkse stoelgang heeft, wacht u totdat u alle drie de containers heeft kunnen vullen. **De meerdere dagen tussen de monsterafnames is niet van invloed op het onderzoek.**
- De **feces- en histaminebuis** moeten samen met de **TFT-test op DAG 3** worden afgenomen.
- De **fixatievloeistof in de TFT-kit** (buis 1 en 3) is nodig om de zogeheten 'vegetatieve stadia' van de darmparasieten te kunnen aantonen. Na de stoelgang op DAG 1 en DAG 3 moet de ontlasting direct in de fecesbuizen worden gedaan, omdat sommige stadia van de darmparasieten na 30 minuten buiten het lichaam niet meer detecteerbaar zijn.
- Bij doorspoeltoiletten valt de ontlasting direct in het water. Dit maakt het verzamelen lastig en kan de betrouwbaarheid van het onderzoek verminderen. Naast de ontlastingsopvangervat is het een goed idee om enkele langere stukken toiletpapier dubbelgevouwen op het wateroppervlak te leggen. De ontlasting kan dan vanaf de ontlastingsopvangervat of het toiletpapier worden verzameld.

Extra richtlijnen voor vrouwen


Gelieve geen feces af te nemen tijdens de menstruatie.

NB! Afname kan vanaf zaterdag worden gestart. Verzenden kan vanaf maandag tot en met uiterlijk donderdag. Let op: de testkit op laatste dag van afname direct verzenden.

Afname van het monster DAG 1


TFT-kit

1. Bevestig de ontlastingopvangster om de toiletbril en vang uw ontlasting daarmee op.
2. Neem TFT-buis 1 met vloeistof uit de blister en vul de buis met ontlasting.
Let op: De ontlasting en vloeistof samen mogen niet boven de rode streep uitkomen. Zorg dat de ontlasting volledig wordt omhuld door de vloeistof.
3. Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis en schud de buis rustig (ca. 20 seconden).
4. Noteer de afnamedatum op de buis.
5. Bewaar de buis in de blister in de koelkast.

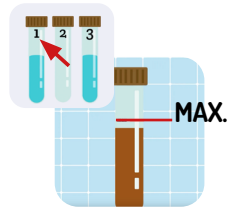

Afname van het monster DAG 2




1. Bevestig de ontlastingopvangster om de toiletbril en vang uw ontlasting daarmee op.
2. Neem TFT-buis 2 zonder vloeistof uit de blister en vul de buis voor de helft met ontlasting.
NB: Neem van tenminste 3 verschillende plaatsen een schepje ontlasting!
3. Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis.
4. Noteer de afnamedatum op de buis.
5. Bewaar de buis in de blister in de koelkast.

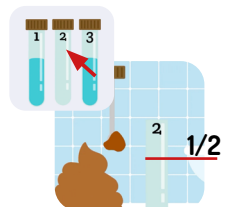

Afname van het monster DAG 3


Vervolg TFT-kit

1. Bevestig de ontlastingsopvangner om de toiletbril en vang uw ontlasting daarmee op.
2. Neem **TFT-buis 3 met vloeistof** uit de blister en vul de buis met ontlasting.
Let op: De ontlasting en vloeistof samen mogen niet boven de rode streep uitkomen. Zorg dat de ontlasting volledig wordt omhuld door de vloeistof.
3. Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis en schud de buis rustig (ca. 20 seconden).
4. Noteer de afnamedatum op de buis.
5. Doe de derde TFT-buis in de blister en stop de blister met de 3 buisjes in de SafetyBag.
6. Verwijder de witte folie van de SafetyBag. Druk de vrijgekomen plakstrip aan zodat het zakje goed is afgesloten.

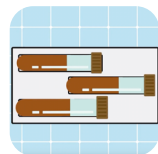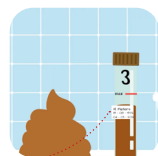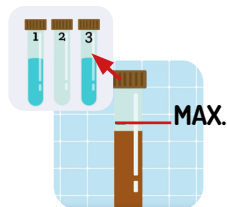


Fecesbuizen

7. Vul de twee fecesbuizen minimaal voor de helft met ontlasting. **NB: Neem van tenminste 6 verschillende plaatsen een scheepje ontlasting.**
8. Schroef de fecesbuizen dicht en stop deze in de RigidSafetyBag® in het harde plastic hoesje. Druk de vrijgekomen plakstrip aan zodat het zakje goed is afgesloten.
- De RigidSafetyBag® bevat absorberend materiaal dat de buizen beschermt tijdens transport.

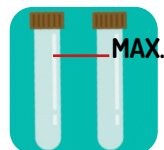

Histaminebuis

9. Neem het buisje met blauwe adaptor en de groene stick. Hou de transparante buis met blauwe adaptor vast met één hand met de duim en wijsvinger. Draai met de duim en wijsvinger van de andere hand de groene stick open.
Let op: de vloeistof moet in het buisje blijven!

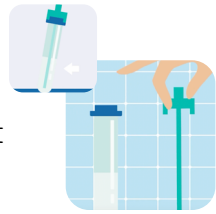

10. Steek het kammetje van de groene stick op 3 verschillende plekken in de ontlasting.
Let op: alle inkepingen van het kammetje moeten gevuld zijn. Indien dit niet direct het geval is, steek het kammetje dan nogmaals in de ontlasting, totdat alle kammetjes gevuld zijn.



*Zorg ervoor dat alleen de inkepingen van het kammetje gevuld zijn.
Te veel monstermateriaal leidt tot vals-positieve testresultaten!*

11. Steek het kammetje door de opening van de blauwe adaptor. Druk de groene stick door, totdat deze niet meer verder kan. Het gevulde kammetje moet in de vloeistof zitten.
12. Draai de groene dop dicht, totdat de groene dop vastklemt in de blauwe adaptor.
Het buisje is nu correct afgesloten.



13. Stop de histaminebuis in de het harde plastic hoesje.

14. Verwijder de witte folie van de RigidSafetyBag®. Druk de vrijgekomen plakstrip aan zodat het zakje goed is afgesloten.
- De RigidSafetyBag® bevat absorberend materiaal dat de histaminebuis beschermt tijdens transport.



Overige handelingen DAG 3

15. Noteer de afnamedata van de drie afnamedagen op het aanvraagformulier en ga akkoord met de voorwaarden.
16. Doe de 3 SafetyBags samen met het aanvraagformulier in de retourenvelop en plak deze dicht. De retourenvelop is nu gereed voor verzending naar ons laboratorium.



Verzenden:

- Binnen Nederland moet de verzending op **maandag t/m donderdag** (bij postbuslichting of PostNL-punt) plaatsvinden.
- Vanuit België versturen vanaf maandag t/m woensdag via UPS.

NB: Verstuur niet in het weekeinde of voor nationale feestdagen!



Versturen naar:

NL: RP Analytic • Antwoordnummer 1461 • 4460 VS Kamperland

België: RP Analytic • Afgeven bij een UPS-accesspoint

ANAMNESE
DIAGNOSTIEK



THERAPEUTISCHE
INTERVENTIE



SCHOLING
ONTWIKKELING

