

INSTRUCTIES VOOR HET VERZAMELEN EN VERZENDKLAAR MAKEN VAN DE TESTKIT: FECES



Lees eerst de instructies helemaal door voordat u aan de afname van het monster begint! Bij vragen: neem eerst contact op met uw behandelaar!

De testkit bestaat uit:

- Handleiding voor monsterafname
- Fecesbuis (bruine dop)
- Ontlastingsopvangner
- RigidSafetyBag®



Daarnaast heeft u een retourenvelop en aanvraagformulier van RP Analytic ontvangen. Is uw pakket niet compleet? Neem dan telefonisch contact op via +31(0)113-370170 (ma.-vr. 8:30-12:30 en 13:30-17:00).

Vorbereiding:

1. Vul uw naam en geboortedatum in op het etiket op de fecesbuis.
2. Controleer of uw gegevens correct zijn ingevuld op het aanvraagformulier.
3. Vul de afnamedatum in op het aanvraagformulier en ga akkoord met de voorwaarden.
4. Bekijk de instructiefilm via de volgende YouTube link:



Of via de website:

www.rpsanitashumanus.com/diensten/rp-analytic/testkits

Belangrijk!

Bij doorspoeltoiletten valt de ontlasting direct in het water. Dit maakt het verzamelen lastig en kan de betrouwbaarheid van het onderzoek verminderen. Naast de ontlastingsopvangner is het een goed idee om enkele langere stukken toiletpapier dubbelgevouwen op het wateroppervlak te leggen. De ontlasting kan dan vanaf de ontlastingsopvangner of het toiletpapier worden verzameld.

Extra richtlijnen voor vrouwen


Gelieve geen feces af te nemen tijdens de menstruatie.



NB! Afname en verzenden van maandag tot en met donderdag. Bij voorkeur de testkit op dag van afname verzenden.

Afname van het monster:

1. Bevestig de ontlastingsopvangner op de toiletbril en vang uw ontlasting daarmee op.
2. Vul de fecesbuis minimaal voor de helft met ontlasting.
NB: Neem van tenminste 6 verschillende plaatsen een scheepje ontlasting!
3. Schroef de fecesbuis dicht en stop dit in de RigidSafetyBag® in het harde plastic hoesje.
4. Verwijder de witte folie van de RigidSafetyBag®. Druk de vrijgekomen plakstrip aan, zodat het zakje goed is afgesloten.
- De RigidSafetyBag® bevat absorberend materiaal dat de fecesbuis beschermt tijdens transport.
5. Noteer de afnamedata op het aanvraagformulier en ga akkoord met de voorwaarden.
6. Doe de RigidSafetyBag® samen met het aanvraagformulier in de retourenvelop en plak deze dicht. De retourenvelop is nu gereed voor verzending naar ons laboratorium.

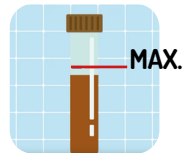

Verzenden:

- Binnen Nederland moet de verzending op **maandag t/m donderdag** (bij postbuslichting of PostNL-punt) plaatsvinden.
- Vanuit België versturen vanaf maandag t/m woensdag via UPS.

NB: Verstuur niet in het weekeinde of voor nationale feestdagen!



Versturen naar:

NL: RP Analytic • Antwoordnummer 1461 • 4460 VS Kamperland

België: RP Analytic • Afgeven bij een UPS-accesspoint