

INSTRUCTIES VOOR HET VERZAMELEN EN VERZENDKLAAR MAKEN VAN DE TESTKIT: TFT



Lees eerst de instructies helemaal door voordat u aan de afname van de monsters begint! Bij vragen: neem eerst contact op met uw behandelaar!


De testkit bestaat uit:

- Handleiding voor monsterafname
- 3x Fecesbuis groot.
DAG 1 en DAG 3 bevatten (SAF) vloeistof, voor fixatie van parasieten.



Let op: De fixatievloeistof (SAF) heeft een geringe toxiciteit. Huidcontact is, indien dit direct met water wordt afgespoeld niet schadelijk. De waarschuwing dient met name om te voorkomen dat kinderen de vloeistof drinken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Giet de fixatievloeistof niet uit de buis.

- Eén blister bestemd voor drie fecesbuizen
- 3x Ontlastingsopvanger
- SafetyBag

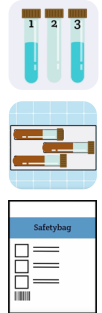

Daarnaast heeft u een retourenvelop en aanvraagformulier van RP Analytic ontvangen. Is uw pakket niet compleet? Neem dan telefonisch contact op via +31(0)113-370170 (ma.-vr. 8:30-12:30 en 13:30-17:00).

Vorbereiding:

1. Vul uw naam en geboortedatum in op de etiketten op de fecesbuizen.
2. Controleer of uw gegevens correct zijn ingevuld op het aanvraagformulier.
3. Controleer of er vloeistof in buis 1 en 3 zit. Is dit niet het geval? Neem dan eerst contact met ons op via het bovenstaand telefoonnummer.
4. Vul de afnamedatum in op het aanvraagformulier en ga akkoord met de voorwaarden.
5. Bekijk de instructiefilm via de volgende YouTube link:



Of via de website:

www.rpsanitashumanus.com/diensten/rp-analytic/testkits



Belangrijk!

- Deze test moet op **drie opeenvolgende dagen** worden afgenomen. Darmparasieten worden onregelmatig uitgescheiden, daarom is het belangrijk om op drie verschillende dagen ontlasting af te nemen.
- Indien u meerdere malen per dag ontlasting produceert, dient u toch slechts **éénmaal per dag een container te vullen**. Indien u geen dagelijkse stoelgang heeft, wacht u totdat u alle drie de containers heeft kunnen vullen. **De meerdere dagen tussen de monsterafnames is niet van invloed op het onderzoek.**
- De **fixatievloeistof** (buis 1 en 3) is nodig om de zogeheten 'vegetatieve stadia' van de darmparasieten te kunnen aantonen. Na de stoelgang op DAG 1 en DAG 3 moet de ontlasting direct in de fecesbuizen worden gedaan, omdat sommige stadia van de darmparasieten na 30 minuten buiten het lichaam niet meer detecteerbaar zijn.
- Bij doorspoeltoiletten valt de ontlasting direct in het water. Dit maakt het verzamelen lastig en kan de betrouwbaarheid van het onderzoek verminderen. Naast de ontlastingsopvangervanger is het een goed idee om enkele langere stukken toilet papier dubbelgevouwen op het wateroppervlak te leggen. De ontlasting kan dan vanaf de ontlastingsopvangervanger of het toilet papier worden verzameld.
- Moet u naast de TFT nog andere ontlastingsmonsters (feces, histamine en/of microbiom) afnemen? Start dan met de TFT en neem op DAG 3 van deze testkit ook de andere testkits af.

NB! Afname kan vanaf zaterdag worden gestart. Verzenden kan vanaf maandag tot en met uiterlijk donderdag. Let op: de testkit op laatste dag van afname direct verzenden.




Afname van het monster DAG 1


1. Bevestig de ontlastingsopvangervanger op de toiletbril en vang uw ontlasting daarmee op.



2. Neem **TFT-buis 1 met vloeistof** uit de blister en vul de buis met ontlasting.
Let op: De ontlasting en vloeistof samen mogen niet boven de rode streep uitkomen. Zorg dat de ontlasting volledig wordt omhuld door de vloeistof.

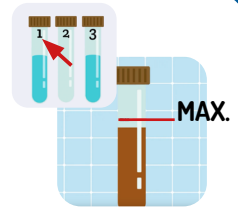


3. Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis en schud de buis rustig (ca. 20 seconden).
4. Noteer de afnamedatum op de buis.
5. Bewaar de buis in de blister in de koelkast.

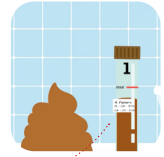


Afname van het monster DAG 2

1. Bevestig de ontlastingopvanger om de toiletbril en vang uw ontlasting daarmee op.
2. Neem **TFT-buis 2 zonder vloeistof** uit de blister en vul de buis voor de helft met ontlasting.
NB: Neem van tenminste 3 verschillende plaatsen een schepje ontlasting!

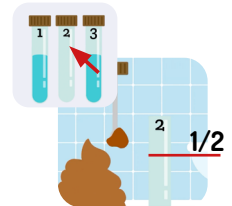

3. Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis.
4. Noteer de afnamedatum op de buis.
5. Bewaar de buis in de blister in de koelkast.

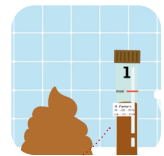



Afname van het monster DAG 3

1. Bevestig de ontlastingopvanger om de toiletbril en vang uw ontlasting daarmee op.





Z.O.Z.

2. Neem TFT-buis 3 met vloeistof uit de blister en vul de buis met ontlasting.
Let op: De ontlasting en vloeistof samen mogen niet boven de rode streep uitkomen. Zorg dat de ontlasting volledig wordt omhuld door de vloeistof.
3. Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis en schud de buis rustig (ca. 20 seconden).
4. Noteer de afnamedatum op de buis.

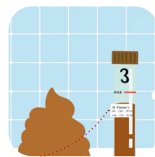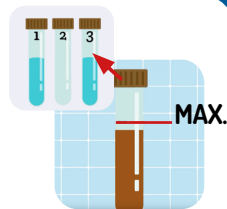

Overige handelingen DAG 3

5. Doe de derde buis in de blister en stop de blister met de 3 buisjes in de SafetyBag.
6. Verwijder de witte folie van de SafetyBag. Druk de vrijgekomen plakstrip aan zodat het zakje goed is afgesloten.
7. Noteer de afnamedata van de drie afnamedagen op het aanvraagformulier en ga akkoord met de voorwaarden.
8. Doe de SafetyBag samen met het aanvraagformulier in de retourenvelop en plak deze dicht. De verzendenvolp is nu gereed voor verzending naar ons laboratorium.

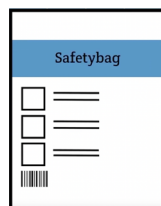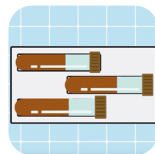

Verzenden:

- Binnen Nederland moet de verzending op **maandag t/m donderdag** (bij postbuslichting of PostNL-punt) plaatsvinden.
- Vanuit België versturen vanaf **maandag t/m woensdag** via UPS.

NB: Verstuur niet in het weekeinde of voor nationale feestdagen!

Versturen naar:



NL: RP Analytic • Antwoordnummer 1461 • 4460 VS Kamperland

België: RP Analytic • Afgeven bij een UPS-accesspoint